

MANUAL PARA COLOCARSE LOS TRAJES

1



Estando sentado, inserte sus pies dentro de las piernas del traje. estire sus piernas completamente mientras hala la prenda hacia arriba, hasta la cintura.

2



Póngase los guantes e inserte una mano en la manga de la prenda y hálela hasta su hombro, haga lo mismo con la otra mano en la otra manga. **Deje las mangas del traje por encima del guante.**

3



Póngase los accesorios de protección respiratoria y visual, y asegúrese de no tener expuestos elementos no necesarios (llaves, gorras), colóquese la capucha anexa y cierre la cremallera.

4



Ajuste todos los cauchos para que no le lastimen y se genere el cierre total del traje.

MANUAL PARA RETIRARSE LOS TRAJES

1



Sin retirarse los guantes.

Abra la cremallera, retire la capucha de su cabeza, sin tocar la piel.

2



Retire el traje de sus hombros.

Saque los brazos de las mangas.

3



Baje la prenda a la altura de sus rodillas y siéntese.

Retírese los zapatos.

4



Hale el traje fuera de sus piernas y retírelo.

Retírese la careta, el tapabocas y por ultimo los guantes.

MANUAL PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR LOS TRAJES

1



Una vez termine el turno y se disponga a retirar el traje, primero rocíelo con un spray con alcohol cubriendo la totalidad del traje.

2



Retírelo de acuerdo al protocolo divulgado previamente.

Recuerde no sacudirlo.

3



Proceda a colocarlo en un gancho y déjelo colgado donde se pueda secar y ventilar, lejos de fuentes de calor.

4



Cuando termine su turno antes de día de descanso, deposítelo en una bolsa cerrada, para llevarlo a lavar.



- ✓ Colóquese guantes.
- ✓ En un recipiente con suficiente agua y jabón sumerja la prenda por 10 minutos.
- ✓ Realice un lavado **SUAVE**.
- ✓ Enjuague retirando todo el jabón.
- ✓ **NO RETORCER.**
- ✓ Dejar secar al sol.

MANUAL PARA USAR Y DESINFECTAR LAS CARETAS

1



Lave sus manos antes y después de tocar la careta.

2



Ubíquela por encima de la cabeza hasta las orejas, acomódelas en el centro de la cara, cubriendo ojos, nariz y boca.

3



Al finalizar cada uso, desinfectar con alcohol y paños desechables.

4



Al retirarla no colocarla sobre las superficies se pueden contaminar, mantenerla colgada.

5



Dejarla en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y de olor.